

تحذير من وسيلة طبية تستخدم في التنفس الاصطناعي



دبي: إيمان عبدالله آل علي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من وسيلة طبية تستخدم في التنفس الاصطناعي، بسبب خلل قد يهدد حياة المريض، وأوصت بضرورة تدريب جميع الموظفين على أجهزة بديلة، للتعامل مع المشكلة إذا حدثت.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته أخيراً لجميع المنشآت الصحية والصيدلانية، جميع ممارسي الرعاية الصحية، أنه بناءً على تعميم صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، فإنه يجب الحذر من مشكلات محتملة للوسيلة الطبية التي تستخدم في عملية التنفس الصناعي، حيث قد تؤثر مشكلة محتملة على «V60/V60 Plus/V680 Ventilator» الدائرة الكهربائية الرئيسية التي تشغل الجهاز والإنذار الخاص به.

وحسب التعميم «في بعض الحالات، قد تنتج عن هذه المشكلة أحد السيناريوهات الآتية»: توقف جهاز التنفس الصناعي عن العمل، ما يؤدي إلى تفعيل كل من الإنذارات المرئية والمسموعة، توقف جهاز التنفس الصناعي عن العمل

دون تفعيل أي من الإنذارات المرئية والمسموعة، كما يمكن أن تؤدي هذه المشاكل إلى إصابة خطيرة، تهدد حياة المريض أو تؤدي إلى الوفاة. وأوصت الوزارة بضرورة توصيل الجهاز إلى نظام الإنذار عن بعد، والاستجابة للإنذارات، وتوفير قياس التأكسج النبضي، والوصول إلى جهاز تهوية بديل، وتدريب جميع الموظفين المعنيين على أجهزة تهوية بديلة.

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.